



PLAN D'URGENCE OCULAIRE

TYPE DE BLESSURE	PRODUIT CONSEILLÉ EN PREMIÈRE URGENCE	RINÇAGE D'APPOINT JUSQU'À CONSULTATION D'UN MEDECIN	DURÉE DE RINÇAGE CONSEILLÉE
Corps étrangers Poussières, salètes, copeaux divers etc.	Lave-œil PLUM	Lave-œil PLUM	Laver les yeux jusqu'à évacuation des corps étrangers
Brûlures par acides	pH Neutral	Lave-œil PLUM	Rincer avec pH Neutral pendant environ 2 minutes jusqu' à vider le flacon, puis continuer avec la Lave-œil Plum jusqu'à l'arrivée du médecin.
Brûlures par bases (exceptées les substances comprenant du calcium, comme par ex. le ciment ou la chaux.)	pH Neutral	Lave-œil PLUM	Rincer avec pH Neutral pendant environ 2 minutes jusqu' à vider le flacon, puis continuer avec la Lave-œil Plum jusqu'à l'arrivée du médecin.
Autres brûlures oculaires chimiques (comme par ex. par des solvants ou des huiles)	Lave-œil PLUM	Lave-œil PLUM	Rincer jusqu'à disparition de la douleur ou jusqu'à l'arrivée du médecin.
Brûlures chimiques cutanées par des bases, alcalins ou autres substances chimiques	pH Neutral	Lave-œil PLUM	Rincer avec pH Neutral pendant environ 2 minutes jusqu' à vider le flacon, puis continuer avec la Lave-œil Plum jusqu'à l'arrivée du médecin.



Lave-œil PLUM
pH Neutral



1. Sortir le flacon de la station.



2. Tourner l'ocillère dans le sens des flèches jusqu'à perforation de l'opercule.



3. Appliquer l'ocillère. Rincer l'œil, tête penchée en arrière, vous pouvez rincer.



4. Ou en avant – si l'on ne veut pas se mouiller les vêtements

IMPORTANT!

La solution pour lavage des yeux doit pénétrer dans les yeux par un flux faible et régulier. Pressez le flacon avec douceur. La consultation d'un médecin suite à toute blessure oculaire est conseillée, en continuant le rinçage pendant le transport du blessé.